

snogg®

ANIMAL CARE



— Animal — **WOUND CARE**

FOR BEHANDLING OG BESKYTTELSE



Sårbehandling på dyr siden 1980

Snøgg Animal Care lanserer et nytt og forbedret pakningsdesign med klare instruksjoner for enkel bruk. I tillegg er utvalget utvidet med to produkter for å kunne levere et mer komplett produktutvalg for skadebehandling på dyr.



Hvor kan Adhesive Foam Bandage brukes? Få svar på det og mer på vår hjemmeside. Skann QR-koden for å komme til FAQ!

Nyhet



Snøgg utvider sortimentet med tre bandasjer for forskjellige typer sår, inkludert små sår, kraftig væskende sår og sår med infeksjonsrisiko. De tre primærbandasjene festes enkelt med **Adhesive Foam Bandage**.



- ✓ Enkel å legge på og fjerne – uten unødig stress for dyret
- ✓ Kan brukes til å bandasjere vanskelige områder på dyrets kropp
- ✓ Flerbruksegenskaper – kombiner og tilpass for alle typer dyr og stadier i skadens helingsprosess
- ✓ Kan enkelt kombineres med andre sårbehandlingsprodukter
- ✓ For behandling og støtte
- ✓ Forpakningsdesign med tydelige instruksjoner.



Primærbandasje

Snøgg utvider sortimentet med tre nye primærbandasjer for å møte flere behov innenfor sårpleie. De nye bandasjene er utviklet for å håndtere forskjellige typer sår og tilstander: små sår, kraftig væskende sår og sår med risiko for infeksjon. De fungerer utmerket i kombinasjon med øvrige sårpleieprodukter og festes enkelt ved hjelp av *Adhesive Foam Bandage*.

BactiDefend DRESSING

Nyhet

REDUSERER BIOBYRDEN OPP TIL 99%

En steril hydrogelforbinding som bruker peptider som etterligner immunsystemet. Forbindingen binder og fysisk ødelegger bakterier uten å lekke ut noen stoffer. Forbindingen fremmer også sårheling ved å gi et fuktig miljø. Sikker og biokompatibel. Kun for profesjonell bruk. Bruk på tørre eller lett væskende sår.

- Bruker peptider som etterligner immunsystemet
- Binder og fysisk ødelegger bakterier
- Fremmer sårheling



REF 510003786
5 stk. (4,5 x 15 cm)

Foam COMPRESS



FREMMER SÅRHELING

En steril og absorberende skumkompress som holder såret fuktig og fremmer sårheling. En myk og fleksibel kompress som følger kroppens bevegelser. Den fester seg ikke til såret og kan klippes til ønsket størrelse.

- Steril og absorberende
- Gir fuktig sårheling
- Myk og fleksibel

Nyhet



REF 510003122
10 stk. (10 x 10 cm)



REF 510003123
10 stk. (5 x 5 cm)

Superabsorbent COMPRESS



FOR KRAFTIG VÆSKENDE SÅR

En steril kompress med høy absorberingsevne for kraftig væskende sår. Den interne superabsorberende kjernen kan absorbere store mengder væske. Væsken lukkes inne i bandasjen for å forhindre lekkasje gjennom bandasjen.

- Steril
- Høy absorberingsevne
- Forhindrer lekkasje av væske

Nyhet



REF 510003124
10 stk. (10x10 cm)

REF 510003125
10 stk. (10 x 20 cm)

Adhesive FOAM BANDAGE

Adhesive Foam Bandage er en elastisk skumbandasje med god kleb som hefter både til pels og hud. Bandasjen har lim på én side og er ideell for polstring og fiksering, eller for overvåkingssenheter, f.eks. EKG-elektroder. Du kan enkelt lage en sårbandasje ved å kombinere *Adhesive Foam Bandage* med en kompress, eller *Thick Foam Bandage*.

LATEKS-FRI

- Myk og fleksibel
- Lim på én side
- Kan brukes hvor som helst på dyret



*Når du har bruk for
god kleb på pels*

Adhesive Foam Bandage er tilgjengelig i 3 størrelser for tilpasning til forskjellige dyr og skader:



REF 510002410
(Tidligere Animal Polster)
9 x 200 cm




REF 510002412
(Tidligere Animal Polster)
14 x 200 cm




REF 510002413
(Tidligere Animal Polster)
22 x 200 cm


BANDASJERING AV SÅR:

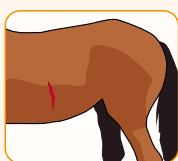

Sørg for at såret er rent og at pelsen er tørr.

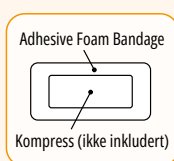

Bruk en kompress (ikke inkludert) til å beskytte såret.

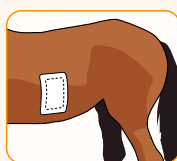

Fiksør kompressen med Adhesive Foam Bandage.



Skann QR-koden for fullstendige instruksjoner.

Adhesive Foam Bandage — REMOVAL WIPES

Våre **Removal Wipes** gir enklere og mer skånsom fjerning av limrester fra dyrets pels og reduserer ubehag og irritasjon. Inneholder ikke alkohol som tørker ut huden. Våtserviettene er et supplement til **Adhesive Foam Bandages**.

VAR SOM FJERNING AV ADHESIVE FOAM BANDAGES:

- Enkel fjerning
- Enkel og effektiv i bruk
- Tørker ikke ut huden/pelsen

LATEKS-FRI



REF 510002378
30 wipes (12 x 18 cm)



*Fleksibilitet og fri bevegelse
med Thick Foam Bandage*

Thick FOAM BANDAGE

Thick Foam Bandage er en unik, selvheftende bandasje; den hefter kun til seg selv, ikke til sår, pels eller hud. Den er fleksibel, gir meget god bevegelighet og er enkel å forme. Den absorberende og myke skumbandasjen er ideell til bruk på sår for å fiksere eller som polstring.


LATEKS-
FRI

- Hefter kun til seg selv
- Kan plasseres direkte på såret
- Absorberende, myk og fleksibel




REF 510002411
(Tidligere Animal Vet)
9 x 200 cm


POTEBANDASJERING:

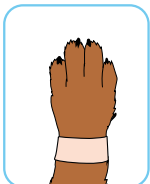


Fest én lengde med Thick eller Thin Foam Bandage rundt beinet.

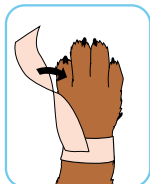

Riv av en passende lengde som passer mellom tærne. Fest den til bandasjen rundt beinet og, snu den 180 grader.

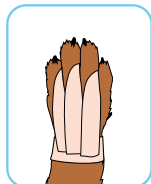


Tre den smale delen inn mellom tærne og fest på andre siden. Gjenta for hver av tærne

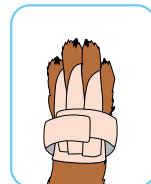


Avslutt ved å feste en bandasje nummer to rundt beinet for å sikre bandasjen.


BANDASJERING AV BEIN:

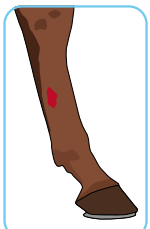

Sørg for at såret er rent og at pelsen/beinet er tørt.

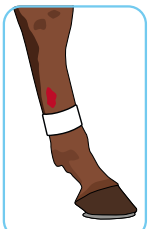

Start med å feste en runde med Adhesive Foam Bandage (ikke inkludert) under det skadde området for fiksering.

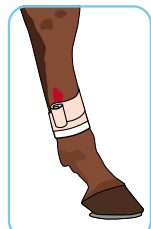

Fest deretter Thick Foam Bandage rundt skaden i et spiral-mønster. Overlapp den første bandasjen med 2–3 cm.



Skift ut den andre bandasjen ved behov. Den første bandasjen fjernes når helingen er fullført.



Skann QR-koden for fullstendige instruksjoner.

Thin FOAM BANDAGE

Thin Foam Bandage er enkel å forme og gir meget god fleksibilitet. Den kryss-elastiske bandasjen hefter mot seg selv, hefter ikke mot hud, pels eller mot såret. Den er myk, absorberende og kan plasseres direkte på såret.


LATEKS-FRI

- Hefter kun mot seg selv
- Kan plasseres direkte på såret
- Mange bruksområder, for eksempel på spener




REF 510002379
(Tidligere Animal Soft)
6 x 450 cm


POTEBANDASJERING:

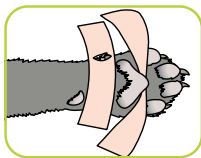


Plasser en lengde med bandasje mellom tærne og tredeputen. Lag en åpning i bandasjen og plasser den rundt sidekloen.

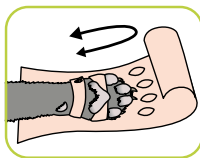

Riv av en remse med bandasje i passe lengde. Lag åpninger til tærne.

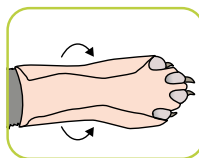

Tre tærne gjennom åpningene og brett bandasjen som vist.


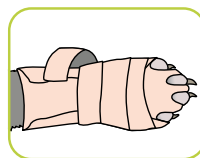


Hvis nødvendig, legg ytterligere en lengde med bandasje rundt poten for å sikre bandasjen.



Skann QR-koden for fullstendige instruksjoner.

SPENEBANDASJERING:

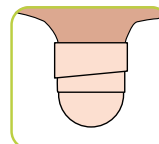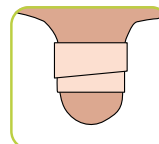

Bruk Thin Foam Bandage ved skader på jur eller til fiksering av spenekopper.





*Elastisk og
selvheftende Thin
Foam Bandage*

Flex WRAP BANDAGE

Flex Wrap Bandage er en fleksibel og elastisk omslagsbandasje. Den hefter ikke mot hud, pels eller sår, og er ideell til fiksering av kompresser og selvheftende skumbandasjer. Beskytter mot smuss og fuktighet og passer på mange deler av dyrets kropp. Tilgjengelig i 2 størrelser.

- Enkel og rask å legge på og fjerne
- Hefter kun til seg selv
- Beskytter mot smuss og fuktighet



REF 510002414
5 x 450 cm

REF 510002393
10 x 450 cm

Oversikt

Enkel fjerning av Adhesive Foam Bandage med REMOVAL WIPES



	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE	FLEX WRAP BANDAGE
Hefter til seg selv – ikke til pels, hud eller sår	x	✓	✓	✓
Hefter meget godt på pels og hud	✓	x	x	x
Tverrelastisk	✓	✓	✓	x
Elastisk i lengderetning	x	✓	✓	✓
Absorberende	x	✓	✓	x
Stopper blødning	x	✓	✓	x
Hefter, selv når den er våt	x	✓	✓	x
Tilfredsstiller krav til primærlag	x	✓	✓	x
Tilfredsstiller krav til sekundærlag	✓	✓	✓	✓
Tilfredsstiller krav til tertiærlag	✓	x	x	✓
Fiksering	✓	✓	✓	✓
Tykkelse	5 mm	5 mm	1,9 mm	

Nyhet



	BACTIDEFEND DRESSING	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Lite væskende sår	✓	✓	x
Moderat væskende sår	x	✓	✓
Kraftig væskende sår	x	x	✓
Sår med infeksjonsrisiko	✓	x	x
Kirurgiske sår	✓	✓	✓
Binder og fysisk ødelegger bakterier	✓	x	x
Fuktig sårheling	✓	✓	x
Steril	✓	✓	✓
Kan klippes til ønsket størrelse	✓	✓	x
Enkel å feste med Adhesive Foam Bandage	✓	✓	✓

www.snogg.com

Norgesplaster AS, Granliven 21, 4707 Vennesla, +47 38 15 22 00, snogg@snogg.no
 ■ Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, Box 1336, SE 171 26 Solna, Sverige