



Ideoita eläinten haavasidontaan

Selitys:
Numerot 1–4 osoittavat, mitä tuotetta käytetään kuvissa.

- 1 THIN FOAM BANDAGE 3 ADHESIVE FOAM BANDAGE
2 THICK FOAM BANDAGE 4 FLEX WRAP BANDAGE



Ole varovainen!
Älä rajoita verenkiertoa kietomalla liian tiukasti.

Korvan sidonta

2 3

2. Taita toinen pala kolmioksi ja aseta se korvan taakse haavan kohdalle tai tukemaan korvaa sidonnan aikana.

3. Leikkaa Thick Foam Bandage -sidoksesta 4,5 cm levyinen pala ja kääri se ympärille.

4. Sido korva Thick Foam Bandage -sidoksella. Pidä se paikoillaan leveämmällä Adhesive Foam Bandage -sidoksella, joka tarttuu ihoon ja turkkiin. Jätä aukko korvakäytävälle ja jätä terve korva ilman sidosta.



TASSUN SITOMINEN

1 2 4


1. Aseta pala Thick Foam Bandage tai Thin Foam Bandage -sidosta varpaiden ja tyynyn väliin. Tee reikä sidokseen ja aseta se kannuskynnen ympärille.

2. Leikkaa sidoksesta sopivan mittainen pala. Tee reiät, jotka menevät varpaiden yli.

3. Vie varpaat reikien läpi ja taita side kuvan osoittamalla tavalla.

4. Kiedo tarvittaessa toinen pala sidosta tassun ympärille kiinnittäaksesi sidoksen.

5. Viimeistele kiinnitys Flex Wrap Bandage -siteellä.

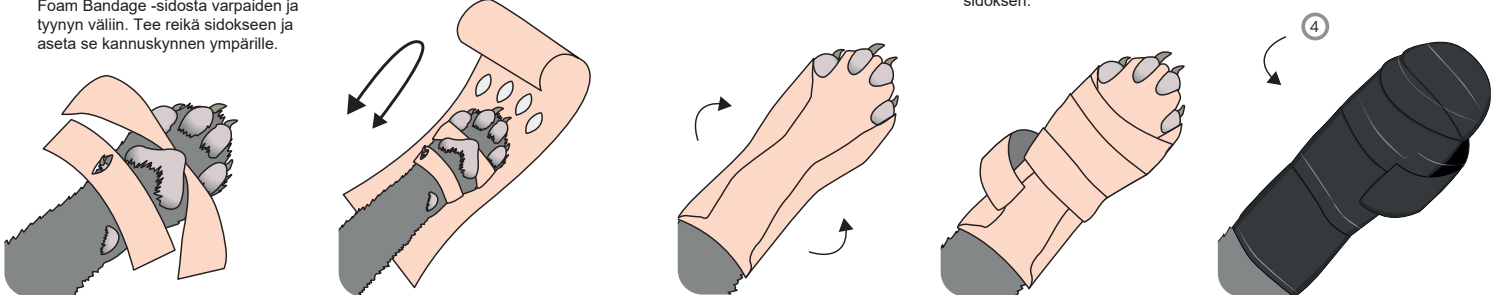

TASSUN SITOMINEN


1. Kääri pala Thick Foam Bandage tai Thin Foam Bandage -sidosta jalan ympäri.

1 2

2. Leikkaa sopivan pituinen pala, joka mahtuu varpaiden väliin. Kiinnitä jalassa olevaan Thick Foam Bandage tai Thin Foam Bandage -sidokseen ja käännä samalla 180 astetta.

3. Vie sidos sivuttain varpaiden väliin ja kiinnitä se toiselle puolelle. Toista jokaisessa varpaassa.

4. Viimeistele kietomalla toinen sidos jalan ympärille, jotta side pysyy paikallaan.

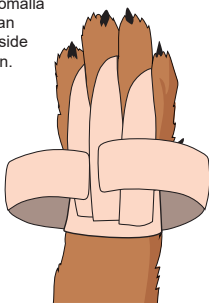

KAVION SITOMINEN

Yksi kierros Thick Foam Bandage -sidosta riittää kavion hoitoon.

2



KAVIONIVEL

Kun sidotaan kavioniveltä, ensimmäinen Adhesive Foam Bandage -sidos kääritään kannusluusta alaspäin. Toinen Thick Foam Bandage -sidos asetetaan injektiokohdan päälle, ja sitä on käärittävä tarpeeksi alas kavioon.

2 3



NIVELINJEKTION JÄLKEEN

Nivelinjektiot tulisi hoitaa eläinlääkärin toimesta.

Sidontaideat:

Thick Foam Bandage -sidos asetetaan suoraan injektiokohdan päälle. On tärkeää hyödyntää sidoksen elastisuutta, jotta se ei liiku paikoiltaan.

2




POLVINIVELEN INJEKTION JÄLKEEN

Aloita käärittämällä Adhesive Foam Bandage -sidos polven alle. Kääri tämän jälkeen Thick Foam Bandage -sidosta injektiokohdan päälle, peittäen kokonaan Adhesive Foam Bandage -sidoksen.



Tällä tavalla Thick Foam Bandage -sidos ei liu'u alaspäin. Lisätuen saamiseksi kiinnitä polven ympäri toinen kerros Adhesive Foam Bandage -sidosta Thick Foam Bandage -sidoksen päälle.

2 3

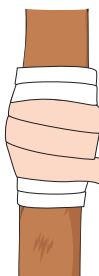

HAAVOJEN SITOMINEN

1. Varmista, että haava on puhdas ja turkki/ jalka kuiva.

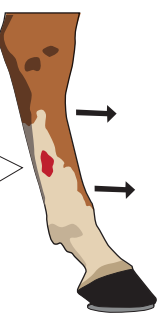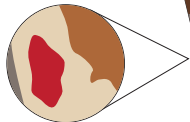


2. Aloita käärimällä yksi kierros Adhesive Foam Bandage -sidosta haavan alapuolelle.

3



3. Kääri Thin tai Thick Foam Bandage -sidos haavan ympäri spiraalimaisesti, niin että se peittää ensimmäisen sidoksen 2–3 cm. Tarvittaessa aseta sideharso haavan päälle lisäimeytymistä varten.


1 2

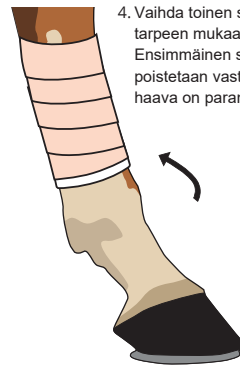

4. Vaihda toinen sidos tarpeen mukaan. Ensimmäinen sidos poistetaan vasta, kun haava on parantunut.


5. Viimeistele Flex Wrap Bandage -siteellä.

4

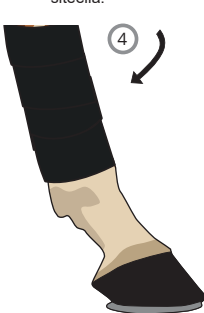


HAAVOJEN HOITO


Varmista, että haava on puhdas ja turkki kuiva.

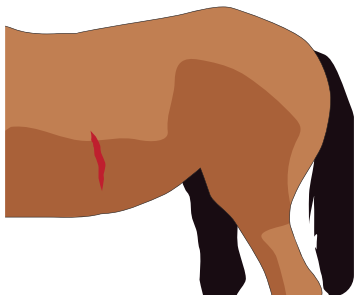

3

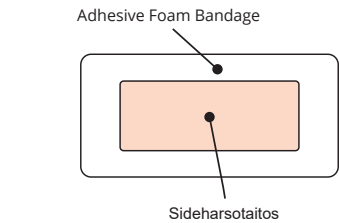

3. Kiinnitä sideharsotaitos Adhesive Foam Bandage -sidoksella.

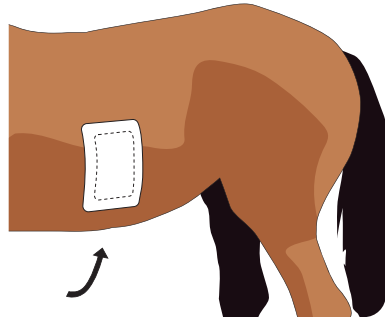

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSET

Huomaa, miten elastisuutta hyödynnetään takareiden sidonnassa.


2



TERVE ALUE

Kiinnitä Adhesive Foam Bandage -sidos suoraan terveelle alueelle.


3

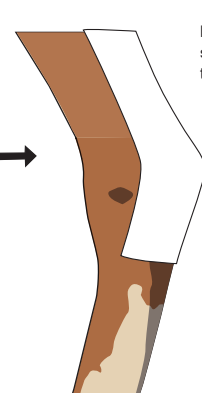

VEDINVAURION SITOMINEN

Käytä Thin Foam Bandage -sidosta vedinvammojen hoidossa tai vedintulppien kiinnittämisessä.

1

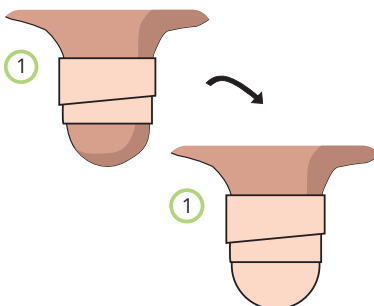

POISTO - ADHESIVE FOAM BANDAGE- SIDOS

Käytä Snøgg Removal Wipes -puhdistuspyyhkeitä tai ihoystävällistä öljyä helpottamaan liiman poistamista.