

snøgg®

ANIMAL CARE



— Animal — WOUND CARE

TIL BEHANDLING OG STØTTE





Sårpleje til dyr siden 1980

Snøgg Animal Care har mere end 40 års erfaring med sårpleje til dyr. Produktsortimentet omfatter forskellige typer forbindinger, som nemt kan tilpasses efter forskellige behov, områder på kroppen og forskellige typer af sår, hvilket giver brugeren valgmuligheder og frihed.



Hvor kan Adhesive Foam Bandage bruges? Få svar på det og meget mere på vores hjemmeside. Scan QR-koden for at komme til Spørgsmål og svar!





- ✓ Nem at påføre og fjerne - uden unødigt ubehag for dyret
- ✓ Kan bruges på vanskelige områder af dyrets krop
- ✓ Alsidig anvendelse - kombiner og tilpas til alle dyrearter og stadier af sårhelingsprocessen
- ✓ Kan nemt kombineres med andre sårplejeprocedurer
- ✓ Til behandling og støtte
- ✓ Emballagedesign med klare instruktioner



Primærbandage

Snøgg Animal Care tilbyder tre typer forbindinger til forskellige typer sår, herunder små sår, kraftigt væskende sår og sår med infektionsrisiko.

Forbindingerne fungerer fremragende i kombination med øvrige sårplejeprodukter og fastgøres bedst med hjælp af *Adhesive Foam Bandage*.

BactiDefend DRESSING

REDUCERER BIOBURDEN OP TIL 99%

En steril hydrogelbandage, som bruger peptider, der efterligner immunsystemet. Bandagen binder og fysisk ødelægger bakterier uden at lække nogen stoffer. Bandagen fremmer også sårheling ved at give et fugtigt miljø. Sikker og biokompatibel. Kun til professionel brug. Brug på tørre eller let væskende sår.

- Bruger peptider, der efterligner immunsystemet
- Binder og fysisk ødelægger bakterier
- Fremmer sårheling



REF 510003786
5 stk. (4,5 x 15 cm)

Foam COMPRESS



FREMMER SÅRHEALING

Et sterilt og absorberende skumkompres, der holder såret fugtigt og fremmer sårheling. En blød og fleksibel bandage, der følger kroppens bevægelser. Den klæber ikke til såret og kan klippes til ønsket størrelse.

- Steril og absorberende
- Giver fugtig sårheling
- Blød og fleksibel



REF 510003122
10 stk. (10 x 10 cm)

REF 510003123
10 stk. (5 x 5 cm)

Superabsorbent COMPRESS



TIL KRAFTIGT VÆSKENDE SÅR

Et sterilt kompres med høj absorptionskapacitet til kraftigt væskende sår. Den interne superabsorberende kerne kan absorbere store mængder væske. Væsken forbliver låst inde i kompresset for at forhindre lækage gennem bandagen.

- Steril
- Høj absorptionskapacitet
- Hjælper til at forhindre lækage af væske



REF 510003124
10 stk. (10 x 10 cm)

REF 510003125
10 stk. (10 x 20 cm)

Adhesive FOAM BANDAGE

Adhesive Foam Bandage er en elastisk skumforbinding med god vedhæftning på både pels og hud. Forbindingen klæber på den ene side og er ideel til polstring og fiksering, f.eks. EKG-elektroder. Du kan nemt anlægge en sårforbinding ved at kombinere *Adhesive Foam Bandage* med et kompres eller *Thick Foam Bandage*.

LATEX-FRI

- Blødt og fleksibelt
- Klæber på den ene side
- Kan påføres overalt på dyret



*Når du har brug for
god vedhæftning på pels*

Adhesive Foam Bandage fås i tre størrelser, der passer til forskellige dyr og sår:



REF 510002410
(Tidligere Animal Polster)
9 x 200 cm




REF 510002412
(Tidligere Animal Polster)
14 x 200 cm




REF 510002413
(Tidligere Animal Polster)
22 x 200 cm


PÅFØR SÅRFORBINDING:

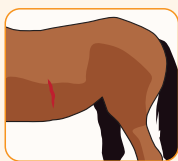

Sørg for, at såret er rent, og at pelsen er tør.

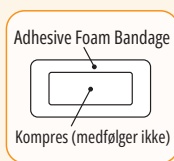

Brug et kompres til at beskytte såret.

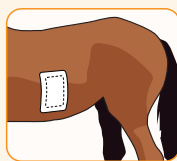

Fastgør kompresset med Adhesive Foam Bandage.



Scan QR-koden for at få flere instruktioner.

Adhesive Foam Bandage REMOVAL WIPES

Removal Wipes gør det lettere og mere skånsomt at fjerne limrester fra dyrets pels, og ubehag og irritation mindskes. Alkoholfri formel, der ikke udtørker huden. Vådservietterne er et supplement til *Adhesive Foam Bandages*.

MERE SKÅNSOM FJERNELSE AF ADHESIVE FOAM BANDAGES:

- Letter fjernelse
- Nem og effektiv brug
- Alkoholfri formel

LATEX-FRI



REF 510002378
30 servietter (12 x 18 cm)



*Fleksibilitet og bevægelsesfrihed
med Thick Foam Bandage*

Thick FOAM BANDAGE

Thick Foam Bandage er en selvklæbende skumforbinding, der ikke klæber fast til sår, pels eller hud. Den er fleksibel, giver god bevægelse og er nem at forme. Den absorberende og bløde skumforbinding er ideel til brug på sår, til fastgørelse eller polstring.


LATEX-FRI

- Selvklæbende
- Kan placeres direkte på såret
- Absorberende, blød og fleksibel




REF 510002411
(Tidligere Animal Vet)
9 x 200 cm


POTEBANDAGE:

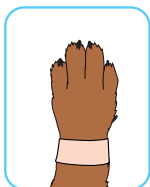


Vikl et stykke Thick eller Thin Foam Bandage rundt om benet

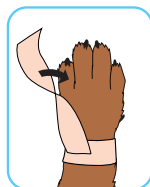

Afriv en passende længde, så det passer mellem tæerne. Fastgør omslaget, og drej 180 grader

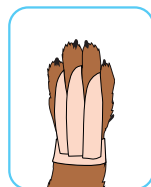

Placer den smalle del mellem tæerne, og fastgør bandagen på den anden side. Gentag for hver tå.

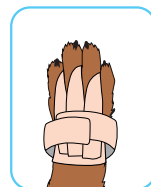

Afslut ved at vikle en anden bandage rundt om benet for at sikre forbindingen.


BENBANDAGE:



Sørg for, at såret er rent, og at pelsen/benet er tør(t).



Begynd med at vikle en omgang Adhesive Foam Bandage under det beskadigede område til fastgørelse.

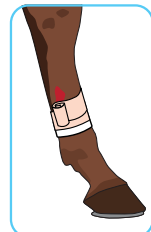

Vikl derefter Thick Foam Bandage over såret i et spirallignende mønster. Overlap den første forbinding med 2-3 cm.



Udskift om nødvendigt den anden forbinding. Den første forbinding fjernes, når såret er helet.



Scan QR-koden for at få flere instruktioner.

Thin FOAM BANDAGE

Thin Foam Bandage er fleksibel og let at forme. Den tværelastiske forbindelse er selvklæbende og klæber ikke fast til sår, pels eller hud. Den er blød, absorberende og kan placeres direkte på såret.


LATEX-FRI

- Selvklæbende
- Kan placeres direkte på såret
- Mange anvendelsesområder, f.eks. koyvere




REF 510002379
(Tidligere Animal Soft)
6 x 450 cm


POTE BANDAGE:

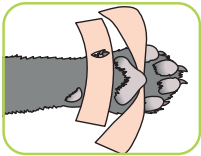


Placer en længde af forbindingen mellem tærne og trædepudden. Skær en slids i forbindingen, og læg den rundt om ulvekloen.

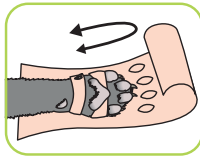

Afriv en passende længde af forbindingen. Lav slidser til klørne.

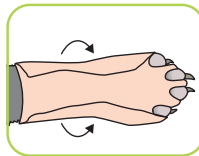

Før klørne gennem slidserne, og fold forbindingen som vist på billedet.


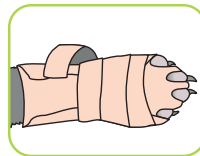


Vikl om nødvendigt en ekstra længde forbindelse rundt om poten for at sikre, at forbindingen sidder korrekt.



Scan QR-koden for at få flere instruktioner.

YVER BANDAGE:

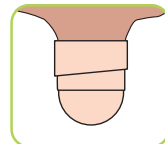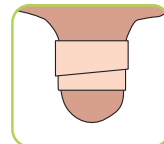

Brug Thin Foam Bandage ved skader på yver og patter.





*Elastisk og
selvklæbende Thin
Foam Bandage*

Flex WRAP BANDAGE

Flex Wrap Bandage er en fleksibel og elastisk yderforbinding. Den klæber hverken til pels, hud eller sår og er ideel til fastgørelse af kompresser og selvklæbende skumforbindinger. Beskytter mod snavs og fugt og kan anvendes på mange dele af dyrets krop. Fås i to størrelser, pakket i et praktisk kartondisplay.

- Hurtig og nem at påføre og fjerne
- Selvklæbende
- Beskytter mod snavs og fugt



REF 510002414
5 x 450 cm

REF 510002393
10 x 450 cm

Produktoversigt

Gør det nemt at fjerne Adhesive Foam Bandage med **REMOVAL WIPES**



	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE	FLEX WRAP BANDAGE
Selvklæbende – klæber ikke til pels, hud eller sår	✗	✓	✓	✓
God vedhæftning på pels og hud	✓	✗	✗	✗
Tværelastisk	✓	✓	✓	✗
Længdeelastisk	✗	✓	✓	✓
Absorberende	✗	✓	✓	✗
Stopper blødning	✗	✓	✓	✗
Hæfter også når det er vådt	✗	✓	✓	✗
Egnet som første lag	✗	✓	✓	✗
Egnet som andet lag	✓	✓	✓	✓
Egnet som tredje lag	✓	✗	✗	✓
Fastgørelse	✓	✓	✓	✓
Tykkelse	5 mm	5 mm	1,9 mm	



	BACTIDEFEND DRESSING	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Let væskende sår	✓	✓	✗
Moderat væskende sår	✗	✓	✓
Kraftigt væskende sår	✗	✗	✓
Sår med infektionsrisiko	✓	✗	✗
Kirurgiske sår	✓	✓	✓
Binder og fysisk ødelægger bakterier	✓	✗	✗
Fugtig sårheling	✓	✓	✗
Steril	✓	✓	✓
Kan klippes til ønsket størrelse	✓	✓	✗
Velegnet til at fastgøre med Adhesive Foam Bandage	✓	✓	✓

www.snogg.com

Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige
Tel +46 (0)8 590 96325, snogganimal@orkla.com, www.snogg.com