

snøgg®

ANIMAL CARE



—Animal— WOUND CARE

FOR BEHANDLING OG BESKYTTELSE



Sårbehandling på dyr siden 1980

Snøgg Animal Care har mer enn 40 års erfaring med skadebehandling for dyr. Utviklingen skjer i samarbeid med veterinærer og eksperter innenfor skader på dyr. Produktene er laget for bruk på dyr – med fokus på dyrevelferd. Produktutvalget består av forskjellige bandasjetyper som alle er enkle å tilpasse til forskjellige behov og kroppsdeler som gir brukeren kreativ frihet.



Snøgg Animal Care

- ✓ Enkel å legge på og fjerne
– uten unødig stress for dyret
- ✓ Kan brukes til å bandasjere
vanskelige områder på dyrets
kropp
- ✓ Flerbruksegenskaper – kombiner
og tilpass for alle typer dyr og
stadier i skadens helingsprosess
- ✓ Kan enkelt kombineres med
andre sårbehandlingsprodukter
- ✓ For behandling og støtte
- ✓ Forpakningsdesign med
tydelige instruksjoner



Hvor kan *Adhesive Foam Bandage* brukes? Få svar på det og mer på vår hjemmeside. Skann QR-koden for å komme til FAQ!

Adhesive FOAM BANDAGE

LATEKS-
FRI

Adhesive Foam Bandage er en elastisk skumbandasje med god kleb som hefter både til pels og hud. Bandasjen har en limoverflate på én side og er særlig godt egnet til polstring og fiksering, også på områder som er vanskelige å bandasjere.

Produktet kan brukes alene eller kombineres med kompress og/eller **Thick Foam Bandage** for å skape en komplett og stabil sårbandasje.



MYK OG FLEKSIBEL

- Myk og fleksibel bandasje
- Lim på én side
- Egnet til både fiksering og ekstra støtte

TIPS TIL BRUK

- Fiksering av kompress
- Fiksering av EKG-elektroder
- Ekstra fiksering av bandasjer

*Når du har bruk for
god kleb på pels*

Adhesive Foam Bandage er tilgjengelig i 3 størrelser for tilpasning til forskjellige dyr og skader:



REF 510002410
9 x 200 cm




REF 510002412
14 x 200 cm




REF 510002413
22 x 200 cm


BANDASJERING AV SÅR:

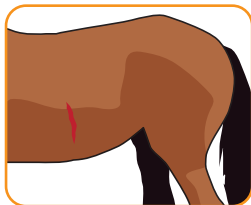

Sørg for at såret er rent og at pelsen er tørr.

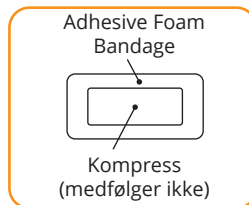


Bruk en passende kompress.

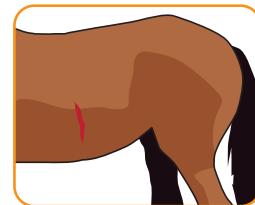

Fiksør kompressen med Adhesive Foam Bandage.


ADHESIVE FOAM BANDAGE SOM HALKSKYDD:

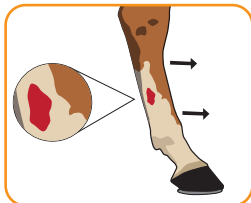

Bruk Adhesive Foam Bandage nedenfor såret før kompress og øvrig bandasje legges på. Adhesive Foam Bandage fungerer da som en stopper og bidrar til å forhindre at bandasjen glir ned, spesielt på bein.



LEDDINJEKSJON I KARPUS:

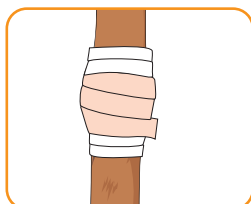

Begynn med å legge Adhesive Foam Bandage under kneet. Deretter legg Thick Foam Bandage over injeksjonspunktet og overlapp det med Adhesive Foam Bandage. Dette fungerer som en stopper og bidrar til å forhindre at bandasjen glir ned.

Ekstra fiksering: For økt stabilitet kan Adhesive Foam Bandage også påføres over bandasjen som et supplerende fikseringstrinn. Særlig godt egnet på områder med mye bevegelse.



Skann QR-koden for ytterligere instruksjoner og instruksjonsvideoer.

Thick FOAM BANDAGE

Thick Foam Bandage er en unik, selvheftende bandasje; den hefter kun til seg selv, ikke til sår, pels eller hud. Den er fleksibel, gir meget god bevegelighet og er enkel å forme. Den absorberende og myke skumbandasjen er ideell til bruk på sår for å fiksere eller som polstring.

REF 510002411
9 x 200 cm



LATEKS-
FRI

MYK OG FLEKSIBEL

- Selvklebende – hefter kun til seg selv
- Kan plasseres direkte på såret
- Absorberende, myk og fleksibel


TIPS TIL BRUK

- Beskyttelse av overflatiske sår
- Potebandasjering
- Bandasjering av områder med mye bevegelse
- Beskyttelse ved behandling av mugg




*Fleksibilitet og fri
bevegelse med
Thick Foam Bandage*


POTEBANDASJERING

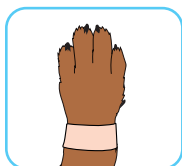


Fest én lengde med Thick eller Thin Foam Bandage rundt beinet.

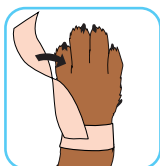

Riv av en passende lengde som passer mellom tærne. Fest den til bandasjen rundt beinet og, snu den 180 grader.

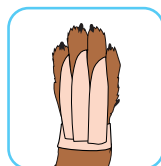


Tre den smale delen inn mellom tærne og fest på andre siden. Gjenta for hver av tærne.

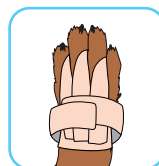


Avslutt ved å feste en bandasje nummer to rundt beinet for å sikre bandasjen.


BEINBANDASJE:

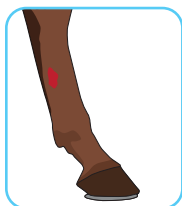

Sørg for at såret er rent og at pelsen er tørr.

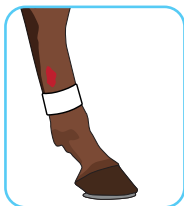

Vikle en omgang Adhesive Foam Bandage under det skadde området for fiksering.

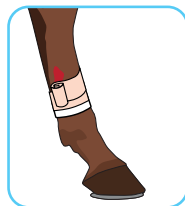

Vikle deretter Thick Foam Bandage over såret i et spiralmønster. La den andre bandasjen overlape den første med 2-3 cm.



Bytt bandasjen ved behov. Den første bandasjen tas bort når såret er helet.

ØREBANDASJE:



Form en bit Thick Foam Bandage til en kjele og før den inn i øret. Dette beskytter øregangen.



Ta en bit som formes til en trekant. Plasser den bak øret, på såret eller for å gi støtte til øret ved bandasjering.




Klipp en bit Thick Foam Bandage til en bredde på ca. 4,5 cm og vikle den rundt øret.



Hold bandasjen på plass med en bredere bit Adhesive Foam Bandage som festes på og rundt hodet. La øreåpningen og det friske øret være ubandasjert.

VED MUGG:

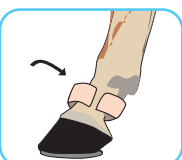

Thick Foam Bandage kan brukes som et beskyttende lag ved behandling av mugg. Mugg krever regelmessig kontroll.

Skann QR-koden for ytterligere instruksjoner og instruksjonsvideoer.



Thin FOAM BANDAGE

LATEKS-
FRI



Thin Foam Bandage er enkel å forme og gir meget god fleksibilitet. Den kryss-elastiske bandasjen hefter mot seg selv, hefter ikke mot hud, pels eller mot såret. Den er myk, absorberende og kan plasseres direkte på såret.

REF 510002379
6 x 450 cm


MYK OG FLEKSIBEL

- Selvklebende – hefter kun til seg selv
- Kan plasseres direkte på såret
- Absorberende, myk og fleksibel


TIPS TIL BRUK

- Potebandasjering
- Spenebandasjering
- Halebandasjering
- Beskyttelse av små, overflatiske sår


POTEBANDASJERING:

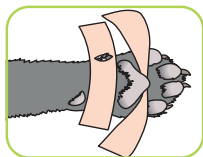


Plasser en lengde med bandasje mellom tærne og tredeputen. Lag en åpning i bandasjen og plasser den rundt sidekloen.

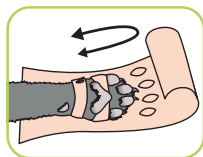

Riv av en remse med bandasje i passe lengde. Lag åpninger til tærne.

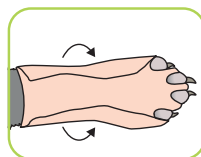

Tre tærne gjennom åpningene og brett bandasjen som vist.


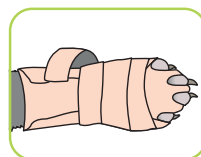


Hvis nødvendig, legg ytterligere en lengde med bandasje rundt poten for å sikre bandasjen.



Skann QR-koden for ytterligere instruksjoner og instruksjonsvideoer.

SPENEBANDASJERING:

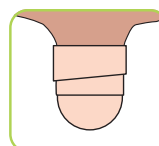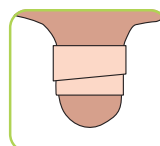

Bruk Thin Foam Bandage ved skader på jur eller til fiksering av spenekopper.

Skann QR-koden for
ytterligere informasjon
och instruktionsvideo

*Elastisk og selvheftende
Thin Foam Bandage*

Primærbandasje

Snøgg Animal Care tilbyr to typer kompress for ulike typer sår, som små sår og kraftig væskende sår. Kompressene fungerer utmerket i kombinasjon med øvrige sårpleieprodukter og festes enkelt ved hjelp av **Adhesive Foam Bandage**.

Foam COMPRESS



FREMMER SÅRHELING

En steril og absorberende skumkompress som holder såret fuktig og fremmer sårheling. En myk og fleksibel kompress som følger kroppens bevegelser. Den fester seg ikke til såret og kan klippes til ønsket størrelse.

- Steril og absorberende
- Gir fuktig sårheling
- Myk og fleksibel



REF 510003122
10 stk. (10 x 10 cm)


Superabsorbent COMPRESS



FOR KRAFTIG VÆSKENDE SÅR

En steril kompress med høy absorberingsevne for kraftig væskende sår. Den interne superabsorberende kjernen kan absorbere store mengder væske. Væsken lukkes inne i bandasjen for å forhindre lekkasje gjennom bandasjen.

- Steril
- Høy absorberingsevne
- Forhindrer lekkasje av væske

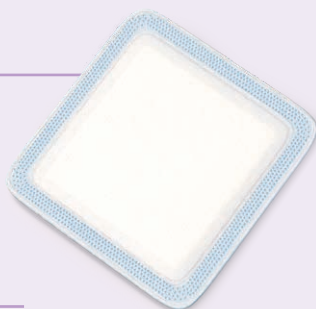

REF 510003124
10 stk. (10x10 cm)

Oversikt



	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE
Hefter til seg selv – ikke til pels, hud eller sår	✗	✓	✓
Hefter meget godt på pels og hud	✓	✗	✗
Tverrelastisk	✓	✓	✓
Elastisk i lengderetning	✗	✓	✓
Absorberende	✗	✓	✓
Stopper blødning	✗	✓	✓
Hefter, selv når den er våt	✗	✓	✓
Tilfredsstiller krav til primærlag	✗	✓	✓
Tilfredsstiller krav til sekundærlag	✓	✓	✓
Tilfredsstiller krav til tertiærlag	✓	✗	✗
Fiksering	✓	✓	✓
Tykkelse	5 mm	5 mm	1,9 mm



	FOAM COMPRESS	SUPERABSORBENT COMPRESS
Lite væskende sår	✓	✗
Moderat væskende sår	✓	✓
Kraftig væskende sår	✗	✓
Kirurgiske sår	✓	✓
Fuktig sårheling	✓	✗
Steril	✓	✓
Kan klippes til ønsket størrelse	✓	✗
Enkel å feste med Adhesive Foam Bandage	✓	✓



ANIMAL CARE

Forhandler:

www.snogg.com

Norgesplaster AS, Granlivegen 21, 4707 Vennesla, +47 38 15 22 00, snogg@snogg.no
Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, Box 1336, SE 171 26 Solna, Sverige